



” Pourquoi est-il important de commencer par préparer tout ce dont tu as besoin ?”



” Quelle doit être la température de l'eau utilisée pour remplir la poche ?”



” Comment dois-tu ouvrir l'emballage de la sonde ?”



” Comment dois-tu assembler les différentes parties ?”





” Pourquoi dois-tu remplir la poche en plastique d’eau avant d’utiliser la sonde ? ”



” Comment fais-tu pour gonfler le ballonnet de la sonde ? ”



” Pourquoi est-il important de gonfler le ballonnet lorsque la sonde est dans tes fesses ? ”



” À quelle vitesse dois-tu pomper l’eau dans tes fesses ? ”





”Comment fais-tu pour retirer la sonde après l’irrigation ?”



”Comment te débarrasses-tu de la sonde utilisée ?”



”Que peux-tu faire sur les toilettes en attendant que le caca vienne ?”



”Vers quel dessin dois-tu tourner le bouton lorsque tu as fini de faire caca ?”





”Pourquoi dois-tu te laver
les mains après avoir fait
caca ?”



”Pourquoi peux-tu
être fier(e) de toi ?”





 Coloplast



 Coloplast



 Coloplast



 Coloplast





SITUATION

” Cela sera plus facile si tu as tout ce dont tu as besoin pour faire caca. ”



SITUATION

” Ouvre le bouchon gris et remplis entièrement la poche d'eau tiède. C'est ce que tu utilises pour t'aider à faire caca. ”



SITUATION

” Ouvre juste un peu l'emballage de la sonde. ”



SITUATION

” Assembler les différentes parties c'est très simple. Le gris va avec le gris. Le bleu va avec le bleu. ”






 Coloplast



 Coloplast



 Coloplast

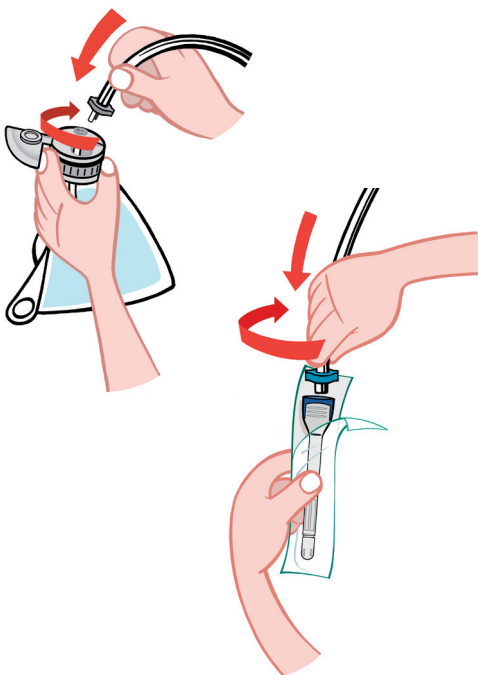


 Coloplast





SITUATION


”Pour que la sonde soit plus douce et plus souple à insérer :

Tourne le bouton vers le symbole de l'eau  et pompe 2 ou 3 fois afin que l'eau remplisse l'emballage de la sonde.

Compte lentement 3 fois jusqu'à 10 avant passer à l'étape suivante.”



SITUATION

”Tourne le bouton vers le symbole du ballonnet . Maintenant tu es prêt(e) à pomper de l'air dans le ballonnet se trouvant sur la sonde.”




SITUATION

”Introduis la sonde lentement et doucement dans tes fesses. Lorsque la sonde est introduite en entière, pompe afin de gonfler le ballonnet tout en maintenant la sonde en place. Le ballonnet, une fois gonflé, permet à la sonde de rester en place, afin que tu n'aies plus besoin de la tenir.”




SITUATION

”Tourne le bouton vers le symbole de l'eau  et pompe très lentement l'eau. N'hésite pas à demander à tes parents quelle quantité d'eau tu dois pomper.”








 Coloplast

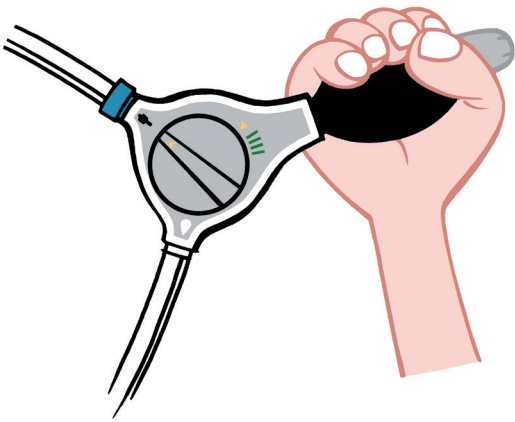


 Coloplast

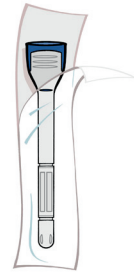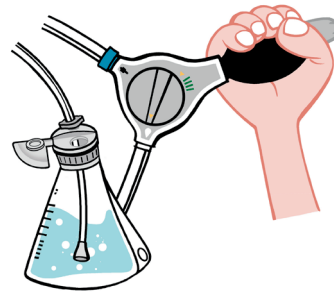

 Coloplast

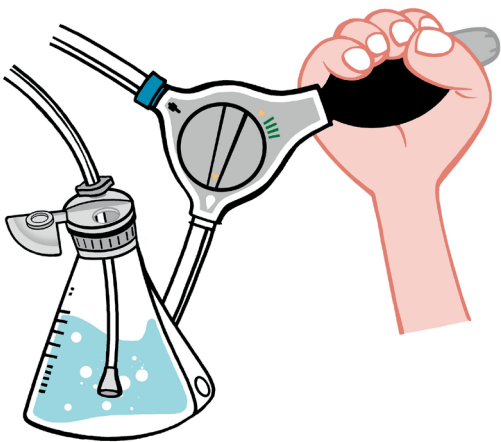


 Coloplast

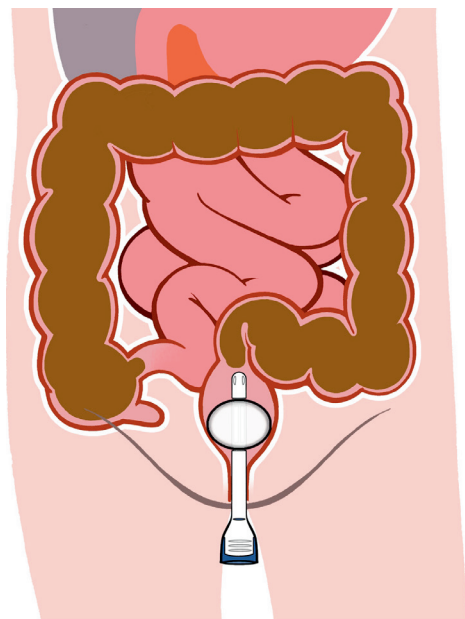



SITUATION

”Tourne le bouton vers le symbole  pour laisser l'air s'échapper du ballonnet. La sonde sortira toute seule, si ce n'est pas le cas tu peux la tirer un peu pour l'aider à sortir. ”



SITUATION

”Remets la sonde dans son emballage et jette-la dans la poubelle. Elle ne doit être utilisée qu'une seule fois. ”




SITUATION

”Attends patiemment au dessus des toilettes jusqu'à ce que tu fasses caca. Pendant ce temps, tu peux lire un livre ou t'amuser avec un jouet. Si cela ne vient pas, tu peux aider en appuyant légèrement sur ton ventre. ”




SITUATION

”Tourne le bouton vers le symbole de fin  et essuie-toi les fesses. ”








 Coloplast

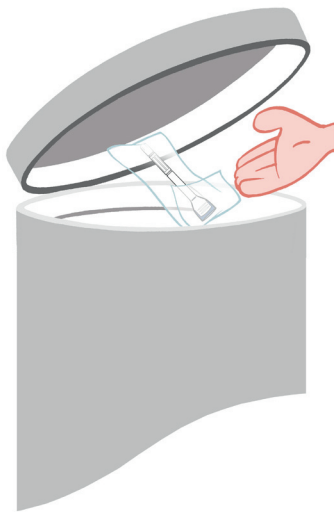


 Coloplast

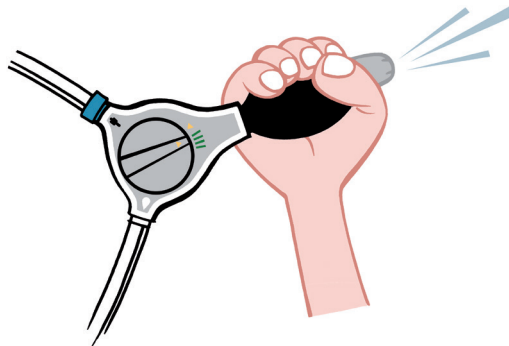

 Coloplast

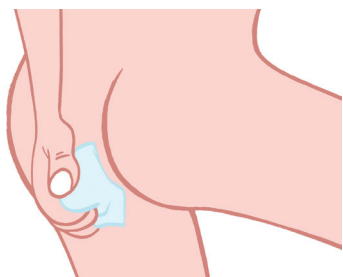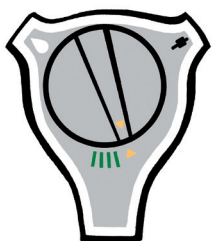

 Coloplast

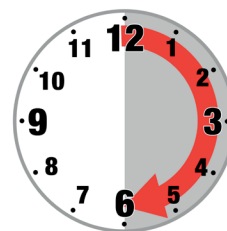



” Afin de ne pas transporter de microbes, il est important de bien te laver les mains après avoir fait caca. ”



” Bravo !
Tu as fait caca tout(e) seul(e). ”





 Coloplast



 Coloplast

