






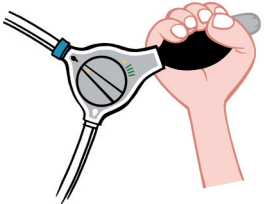

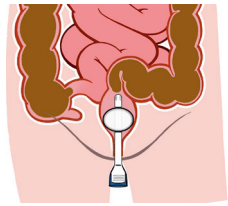


Pour accompagner la gestion des besoins · Enfants
 Etape après étape


	<p>1. Prépare ce dont tu as besoin pour faire caca</p>  <input data-bbox="1430 611 1497 680" type="checkbox"/>
	<p>2. Ouvre le bouchon gris et remplis entièrement la poche d'eau tiède.</p> <input data-bbox="1430 860 1497 929" type="checkbox"/>
	<p>3. Ouvre juste un peu l'emballage de la sonde.</p> <input data-bbox="1430 1108 1497 1178" type="checkbox"/>
	<p>4. C'est très simple d'assembler les différentes parties, regarde... Le gris va avec le gris. Le bleu va avec le bleu.</p> <input data-bbox="1430 1359 1497 1429" type="checkbox"/>
	<p>5. Tiens la sonde à la verticale ou fixe-la sur un mur à l'aide des adhésifs le temps du remplissage. Tourne le bouton vers le symbole  et pompe 2 ou 3 fois afin que l'eau remplisse l'emballage de la sonde. Compte lentement 3 fois jusqu'à 10 avant de passer à l'étape suivante. Pour laisser le temps à la sonde de devenir plus douce et plus lisse.</p> <input data-bbox="1430 1610 1497 1680" type="checkbox"/>
	<p>6. Tourner le bouton vers le symbole  Ne pompe pas tout de suite !</p> <input data-bbox="1430 1951 1497 2020" type="checkbox"/>




7. Attrape la sonde au niveau des stries (voir l'image). Tu peux maintenant introduire la sonde lentement et doucement dans tes fesses. Puis pomper le ballon tout en maintenant la sonde en place.

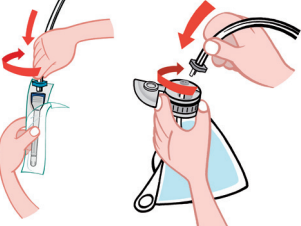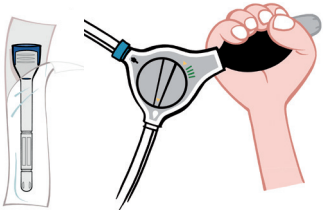Nombre de pompage : _____ (maximum 2 fois)


Avec l'air contenu dans le ballon, la sonde devrait maintenant tenir toute seule

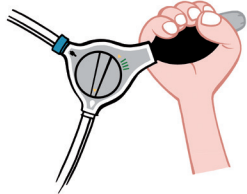


8. Une fois assis sur les toilettes tourne le bouton vers le symbole de l'eau  et pompe très lentement l'eau dans tes fesses.

Demande à tes parents quelle quantité d'eau tu dois pomper.

Quantité d'eau : _____ ml

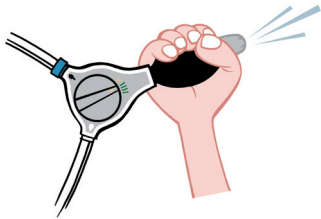

9. Quand tu as fini de pomper l'eau dans tes fesses et que le sachet est vide, tourne le bouton vers le symbole .

La sonde sortira toute seule, sinon tu peux la tirer un petit peu pour l'aider à sortir.




10. Tu peux remettre la sonde dans son sachet et la jeter dans la poubelle.

Elle ne doit être utilisée qu'une seule fois.



11. Attends patiemment au dessus des toilettes que le caca vienne. Si ça ne vient pas, tu peux aider en poussant un petit peu sur ton ventre.

Parfois ça peut venir après quelques minutes (10 minutes)

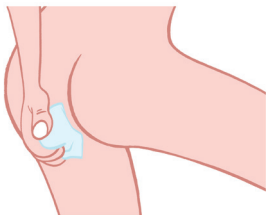

12. Tourne le bouton vers le symbole de fin, c'est le symbole  et essuie toi les fesses.



12. Afin de ne pas transporter de microbes, il est important de bien te laver les mains après avoir fait caca.



Pour plus d'informations
veuillez vous référer à
la notice d'instructions.