


2. Évolution du robinet de vidange de votre poche d'urostomie

Ce nouveau robinet permet de contrôler plus facilement le flux d'urine pendant la vidange de la poche¹. De plus, il permet une bonne prise en main¹ et il est facile de vérifier que le robinet est correctement fermé¹

Le robinet s'ouvre et se ferme en une seule étape avec une simple rotation*

Le robinet nouvelle génération est conçu pour limiter le risque de fuites d'urine à la fermeture. Il est étanche et offre une sécurité à la fermeture²
Doux au toucher, il permet une vidange hygiénique¹ de vos urines.

Scannez ce QR-code et visionnez la vidéo d'utilisation de nos nouvelles poches d'urostomie.

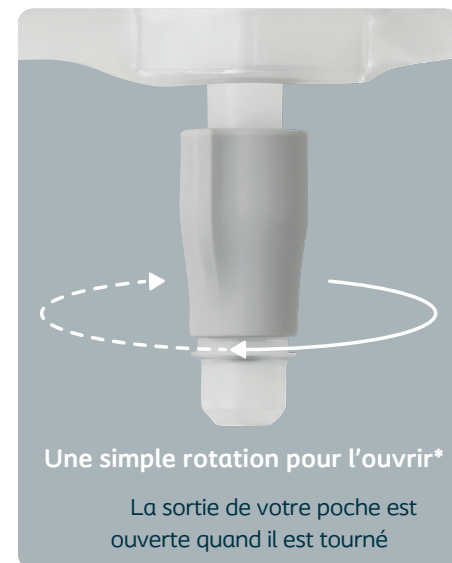

* CF notice d'instructions.

1. Claim support study, OC expansion project Iris & Uro. Octobre 2023 V1. Enquête de satisfaction réalisée auprès de 15 professionnels de santé et 15 patients entérostomisés (USA) concernant le nouveau robinet des poches vidangeables (Coloplast) vs Hollister CeraPlus, Convatec Natura, Dansac Nova-2, B. Braun Flexima. Résultats : 80%/87% des patients ont trouvé le robinet plus facile à ouvrir/fermer vs l'ancien robinet. 73%/87% des professionnels de santé ont trouvé le robinet plus facile à ouvrir/fermer vs l'ancien robinet. 80% des patients et 67% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire que le nouveau robinet permet une vidange hygiénique. 73% des patients et des professionnels de santé ont trouvé le flot d'urine Très facile/Facile à contrôler. 87% des patients et 80% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire que le nouveau robinet offre une bonne prise en main. 93% des patients et 80% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire qu'il est facile de vérifier lorsque le nouveau robinet est correctement fermé.


2. Verification Laboratory Report ISO 8670-2:1996 Ostomy collection bags – OC Expansion – Uro Twist Outlet Juillet 2025 V2. ISO 8670-2:1996 est un test pour vérifier l'étanchéité de la poche de stomie et de son robinet. Résultat : La conformité à la norme ISO 8670-2:1996 a été démontrée pour la poche URO et le nouveau robinet (1P/2P).

Nouvel adaptateur pour connecter vos poches de nuit Coloplast aux poches d'urostomie Sensura® Mio

Les poches d'urostomie Sensura® Mio sont désormais fournies avec un nouvel adaptateur. Il permet le raccordement à votre poche de nuit Coloplast®**

Vous aurez toujours besoin d'un adaptateur pour connecter vos poches de nuit Coloplast aux poches d'urostomie Sensura® Mio

L'adaptateur est fourni dans la boîte de vos poches d'urostomie Sensura Mio

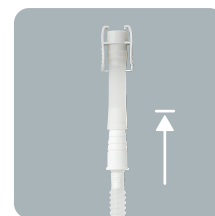

Etape 1

Insérez le nouvel embout de votre poche de nuit Coloplast® dans l'adaptateur pour réaliser le couplage.*



Etape 2

Connectez l'adaptateur à votre poche d'urostomie Sensura® Mio.*



Etape 3

N'oubliez pas de tourner le robinet de votre poche d'urostomie Sensura® Mio en position « ouvert ». Le couplage est fait.*

* CF notice d'instructions

**Lors de l'utilisation de l'adaptateur des poches d'urostomie Sensura® Mio

Ce dispositif médical destiné au recueil passif des effluents de stomies est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lisez attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Pour plus d'informations, consultez votre professionnel de santé.

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée Siège social : 38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-Sous-Bois Téléphone : 01 56 63 17 00 Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL 312 328 362 - SIREN : 312 328 362 CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362
www.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK-3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast

PM-41544 PA. Janvier 2026 . 23333321

 **Coloplast**



Nouvel adaptateur
pour connecter vos
poches de nuit Coloplast
aux poches d'urostomie
Sensura® Mio

1. Système de couplage amélioré

2 améliorations majeures sur votre poche d'urostomie Sensura® Mio*

2. Robinet de vidange nouvelle génération

Sensura® Mio


1. Nouveau système de couplage mécanique SenSura® Mio Click: simple à utiliser, toujours aussi sécurisé¹

Le couplage mécanique de votre poche d'urostomie SenSura® Mio évolue. Sensura® Mio Click avec son système de couplage amélioré est aussi sécurisé que le design précédent pour prévenir les fuites au niveau du couplage.¹



1. Etude CP343 (2023). Rapport clinique P22-23. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura® Mio Click vs SenSura Mio avec le nouveau Click. 47 patients entérostomisés. Critère principal : Fuites à travers le couplage mécanique. Résultats : Pas de différence significative entre SenSura Mio Click et le nouveau Click (15% de poches ayant eu des fuites avec le nouveau Click vs 24% ; p=0,164). Sentiment de sécurité (Tout à fait d'accord/D'accord : 90% des patients se sentent en sécurité en utilisant le nouveau Click SenSura Mio ; p<0.001).

Système de couplage amélioré

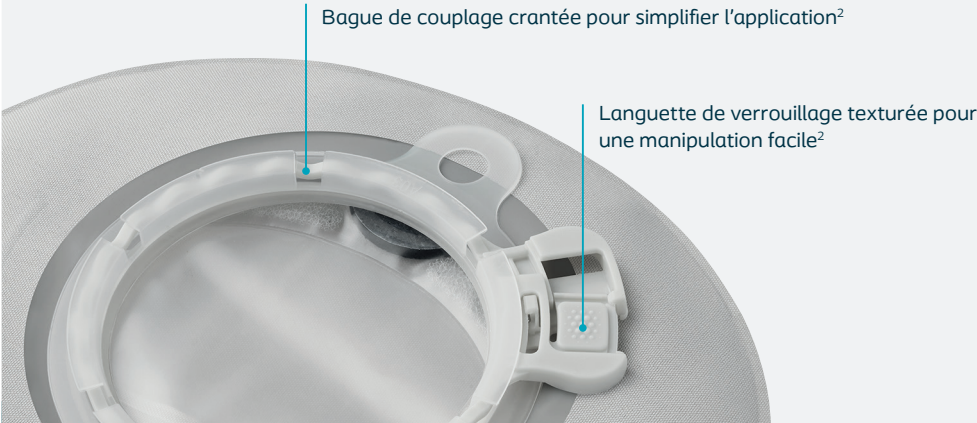

La nouvelle méthode d'application

Cette méthode ne doit être utilisée qu'avec les poches dotées du nouveau couplage. Les poches avec le couplage actuel doivent toujours être appliquées en utilisant la méthode de bas en haut à laquelle vous êtes habitué(e).



Vous avez besoin d'aide pour appliquer cette nouvelle méthode ?

Scannez ce QR Code et visionnez notre vidéo d'utilisation.

Etape 1

Assurez-vous que le support adhésif soit sec et propre (utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer le support adhésif). Assurez-vous que la bague de verrouillage soit ouverte. Alignez le couplage de la poche sur le couplage situé sur le support adhésif.³



Etape 2

Exercez une légère pression avec vos doigts sur la poche jusqu'à ce que vous sentiez que la poche est correctement fixée sur le support.³



Etape 3

Verrouillez la bague de verrouillage par simple pression avec vos doigts. La poche est correctement verrouillée au support lorsque vous entendez un « clic ».³




Retirez la poche en ouvrant la bague de verrouillage en appuyant sur la languette texturée, orientée vers votre abdomen. Maintenez la languette de retrait et retirez la poche en la détachant du support adhésif³




2. Enquête de satisfaction sur le nouveau couplage Click Sensura Mio. Data-on-file (V1), Septembre 2023. P8-9. 15 soignants et 15 patients entérostomisés. Facilité d'appliquer la poche sur le support avec le nouveau Click (Très facile/Facile pour 93% des soignants et 100% des patients). Facilité d'utiliser le nouveau couplage Click (Très facile/Facile pour 80% des soignants et 80% des patients).

Système de couplage précédent

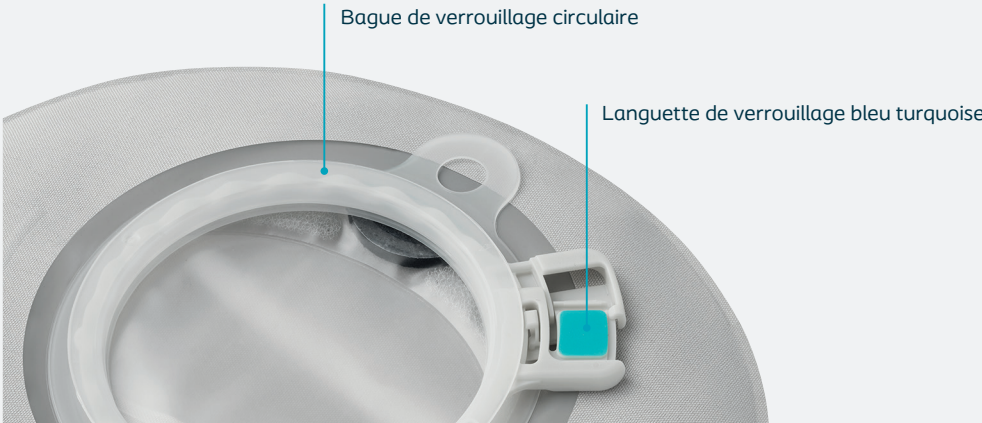


Etape 1

Assurez-vous que la bague de verrouillage soit ouverte et alignez le bas de l'anneau de couplage de la poche sur le bas de la bague de couplage du support adhésif.³

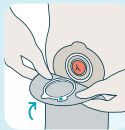

Etape 2

Pressez la poche contre le support sur la partie basse avec vos doigts du milieu.³

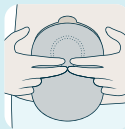

Etape 3

Avec vos index, exercez une légère pression en remontant vers le haut de l'anneau de couplage, jusqu'à ce que vous sentiez que la poche est correctement emboîtée sur le support.³



Etape 4

Verrouillez la bague de verrouillage par simple pression avec vos doigts. La poche est correctement verrouillée au support lorsque vous entendez un « clic ».³



Retrait de la poche

Retirez la poche en ouvrant la bague de fixation en appuyant sur la languette texturée (pointillés en relief), face à votre ventre. Maintenez la languette de retrait et retirez la poche en la détachant du support adhésif.³



La méthode à laquelle vous êtes habitué(e) avec le couplage actuel : une application du bas vers le haut³

3. Cf. notice d'instructions