


Nouvel adaptateur pour connecter vos poches de nuit Coloplast aux poches d'urostomie Sensura® Mio

Les poches d'urostomie Sensura® Mio sont désormais fournies avec un nouvel adaptateur. Il permet le raccordement à votre poche de nuit Coloplast®.*

Vous aurez toujours besoin d'un adaptateur pour connecter vos poches de nuit Coloplast aux poches d'urostomie Sensura® Mio

L'adaptateur est fourni dans la boîte de vos poches d'urostomie Sensura® Mio.

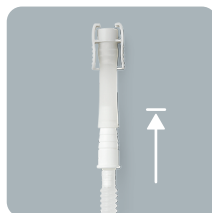


Etape 1

Insérez le nouvel embout de votre poche de nuit Coloplast® dans l'adaptateur pour réaliser le couplage.



Etape 2

Connectez l'adaptateur à votre poche d'urostomie Sensura® Mio

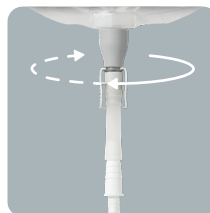

Etape 3

N'oubliez pas de tourner le robinet de votre poche d'urostomie Sensura® Mio en position « ouvert ».

Le couplage est fait.

*Lors de l'utilisation de l'adaptateur des poches d'urostomie Sensura® Mio

Ce dispositif médical destiné au recueil passif des effluents de stomies est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lisez attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Pour plus d'informations, consultez votre professionnel de santé.

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée

Siège social : 38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-Sous-Bois Téléphone : 01 56 63 17 00 Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL 312 328 362 -

SIREN : 312 328 362 CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA

Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

www.coloplast.fr

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK-3050

Humblebæk. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast.

PM-41544 - PA - Janvier 2026. 23333385

Nouvel adaptateur

pour connecter vos poches de nuit Coloplast aux poches d'urostomie Sensura® Mio




Coloplast

NOUVEAU : le robinet de vidange de votre poche d'urostomie évolue

SenSura® Mio

Le robinet nouvelle génération est plus facile à utiliser que la version précédente¹

Le robinet s'ouvre et se ferme en une seule étape avec une simple rotation*. Le robinet nouvelle génération est conçu pour limiter le risque de fuites d'urine à la fermeture. Il est étanche et offre une sécurité à la fermeture². Doux au toucher, il permet une vidange hygiénique¹ de vos urines.

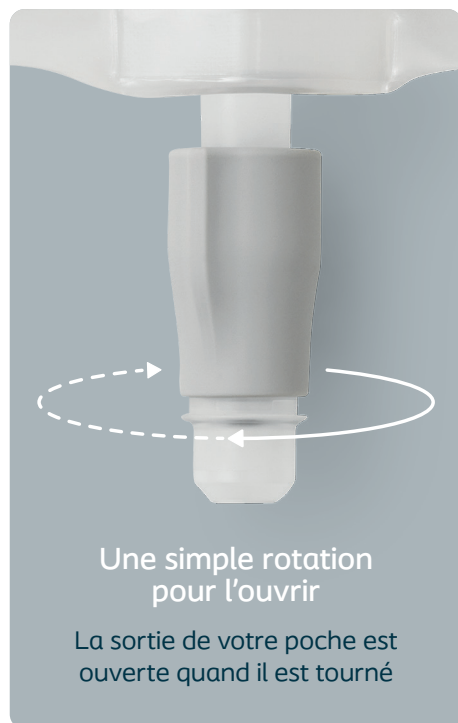

*CF notice d'instructions.

1. Claim support study, OC expansion project Iris & Uro, Octobre 2023 V1. Enquête de satisfaction réalisée auprès de 15 professionnels de santé et 15 patients entérostomisés (USA) concernant le nouveau robinet des poches vidangeables (Coloplast) vs Hollister CeraPlus, Convatec Natura, Dansac Nova-2, B. Braun Flexima. Résultats : 80%/87% des patients ont trouvé le robinet plus facile à ouvrir/fermer vs l'ancien robinet. 73%/87% des professionnels de santé ont trouvé le robinet plus facile à ouvrir/fermer vs l'ancien robinet. 80% des patients et 67% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire que le nouveau robinet permet une vidange hygiénique. 73% des patients et des professionnels de santé ont trouvé le flot d'urine Très facile/Facile à contrôler. 87% des patients et 80% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire que le nouveau robinet offre une bonne prise en main. 93% des patients et 80% des professionnels de santé sont Très d'accord/D'accord pour dire qu'il est facile de vérifier lorsque le nouveau robinet est correctement fermé.

2. Verification Laboratory Report ISO 8670-2:1996 Ostomy collection bags – OC Expansion – Uro Twist Outlet Juillet 2025 V2. ISO 8670-2:1996 est un test pour vérifier l'étanchéité de la poche de stomie et de son robinet. Résultat : La conformité à la norme ISO 8670-2:1996 a été démontrée pour la poche URO et le nouveau robinet (1P/2P).



Scannez ce QR-code et visionnez la vidéo d'utilisation de nos nouvelles poches d'urostomie.



Robinet nouvelle génération

Vous disposez désormais d'un robinet qui s'ouvre et se ferme en une seule étape avec une simple rotation*. Ce nouveau robinet permet de contrôler plus facilement le flux d'urine pendant la vidange de la poche¹.

De plus, il permet une bonne prise en main¹ et il est facile de vérifier que le robinet est correctement fermé¹