

Pour plus d'informations

Le service Relations Utilisateurs

Nos conseillers Coloplast sont disponibles, pour toute question relative à l'utilisation de Peristeen, n'hésitez pas à les contacter au

0 800 01 58 68

Service & appel
gratuits

1. Del Popolo G et al. Traitement des troubles colorectaux d'origine neurologique avec l'irrigation transanale (ITA) : étude multicentrique réalisée en Italie. Spinal Cord 2008;46:517-522. Étude prospective intra-individuelle avant/après Peristeen (durée de suivi 3 semaines). 33 adultes présentant une lésion médullaire. Résultats : amélioration significative de la fonction intestinale ($p=0.01$) et amélioration significative ($p=0.001$) de la qualité de vie. Avant de débiter l'ITA avec Peristeen, 8 patients (24%) consacraient plus d'une heure pour chaque tentative d'exonération. Avec Peristeen, un seul patient continuait à y consacrer plus d'une heure (3%). 24 patients ont considéré être moins dépendant d'un soignant ou d'un aidant, 2 plus dépendants et 6 sans changement. Aucun événement indésirable n'a été signalé.

2. Emmanuel AV. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Review article. Spinal Cord. 2013 Oct;51(10):732-8.

Peristeen : Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Pour plus d'informations, consultez votre professionnel de santé.

Les complications de l'irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations rectales ont été identifiés suite à la pratique d'irrigation colique. Le patient doit contacter immédiatement son médecin ou un service d'urgences s'il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s'accompagne de fièvre, d'un saignement anal prolongé.

[Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle](#)

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

www.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1838P - Avril 2019 - PA



Reprenez le contrôle de votre transit¹

Peristeen®

Peristeen[®], pour un transit maîtrisé

Vous avez tout essayé ?

Suite à une atteinte ou une pathologie neurologique vous souffrez de constipation chronique ou de fuites fécales.

Malgré le suivi régulier de votre traitement laxatif, votre inconfort perdure et il vous arrive de reporter ou même refuser certaines sorties ou activités afin de ne pas risquer un accident ou des douleurs importantes qui rendraient ce moment désagréable.

Peristeen est peut-être votre solution

Peristeen est un système d'irrigation transanale **simple d'utilisation et non chimique**

- S'utilise avec de l'eau tiède (environ 37°C)
- Une irrigation recommandée tous les 2 à 3 jours², après une phase d'adaptation.
- Peut être utilisé de façon autonome ou avec l'aide d'une tierce personne

Peristeen a démontré une **efficacité clinique**¹ dans la gestion de la constipation chronique et des fuites fécales.



N'hésitez pas à en parler avec votre médecin spécialiste, il saura vous conseiller.



Pour plus d'information, rendez-vous sur le site internet : www.coloplast.fr/peristeen

Quelles sont les personnes pouvant bénéficier de Peristeen ?


- Toutes les personnes présentant de l'incontinence fécale et/ou un épisode de constipation chronique causés par une atteinte neurologique
- Pour lesquelles le traitement conventionnel est insuffisant
- Qui doivent consacrer un temps anormalement long à la évacuation des matières.

Qu'est-ce que l'irrigation transanale ?

1. Insertion d'une sonde rectale lubrifiée



4. Dégonflement du ballonnet et retrait de la sonde

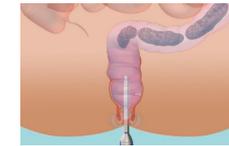


2. Gonflement du ballonnet et instillation de l'eau



5. Evacuation des matières fécales



3. Création d'un mouvement de masse qui pousse les matières fécales

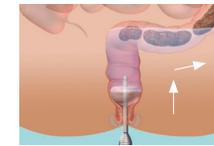

6. Irrigation terminée



Peristeen[®] est un système simple à utiliser



Efficacité¹ :
Peristeen réduit significativement la constipation et les épisodes de pertes fécales.



Réduction du temps d'exonération¹ :
Peristeen permet de gagner en autonomie et de réduire le temps de gestion du transit.



Simple à utiliser et non chimique :
Ce système nécessite uniquement de l'eau et est accessible aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant.